





Uterusprolaps 1.-2. Grad



Uterusprolaps 2.-3. Grad



Zystozele



Rektozele



Belastungsinkontinenz



Anwendung i.d.R. durch Ärztin



Anwendung i.d.R. durch Patientin



Für weitere Informationen siehe: www.profem.eu.



Pessar-Therapie

Die Versorgung mit Vaginalpessaren zur Unterstützung des Halteapparates bei Senkungsbeschwerden ist eine seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzte konservative Therapieoption, die ganz aktuell wieder ein Comeback erlebt.

Die kostengünstige Versorgung mit diesen einfach und unkompliziert zu nutzenden Hilfsmitteln, ihre gute Verträglichkeit und nicht zuletzt die Perspektive, eventuell eine Deszensus- und Inkontinenzoperation verhindern zu können, tragen hierzu bei.

Die hochwertigen ProFem®-Pessare sind in einer Vielzahl von unterschiedlichen Ausführungen und Größen erhältlich und decken fast alle Indikationen bei der Behandlung von Beckenbodensenkungen und einer bestehenden Belastungsinkontinenz ab.

Die **Pessar-Therapie** stellt eine **anerkannte, kostengünstige und effektive Therapie** dar, die in der Regel von den Krankenkassen übernommen wird.

Eine Übersicht der ProFem®Pessare und Informationen zur
Verwendung bei den unterschiedlichen Indikationen finden Sie auf
den folgenden Seiten.



Uterusprolaps 1.-2. Grad



Uterusprolaps 2.-3. Grad



Zystozele



Rektozele



Belastungsinkontinenz



Anwendung i.d.R. durch Ärztin



Anwendung i.d.R. durch Patientin



Für weitere Informationen siehe: www.profem.eu.



Die Klassiker

Cube/Würfel Pessar







nm	ArtNr.	PZN	ArtNr.	PZN
!5	CU25#0	11672837	CU25D#0	11672961
19	CU29#1	11672843	CU29D#1	11672978
3	CU33#2	11672866	CU33D#2	11672984
7	CU37#3	11672872	CU37D#3	11672990
11	CU41#4	11672889	CU41D#4	11673009
15	CU45#5	11672895	CU45D#5	11673015
0	CU50#6	11672903	CU50D#6	11673021
6	CU56#7	11672926	CU56D#7	11673038
53	CU63#8	11672932	CU63D#8	11673044
0	CU70#9	11672949	CU70D#9	11673050
' 5	CU75#10	11672955	CU75D#10	11673067

Das Würfel Pessar kann die Symptome einer Zustozele, einer Rektozele wie auch eines Uterusprolaps 2. oder 3. Grades mildern.

Das Würfel Pessar haftet aufgrund der konkaven Flächen an der Scheidenwand.

Ring Pessar



ohne Verstärkung	mit Verstärkung
mm Art -Nr P7N	■ Art-Nr P7N

	ALC: 141.	1 211	Al to 1410	1 211
43	R1.75#0	11672286	R1.75S#0	11672398
49	R2.00#1	11672292	R2.00S#1	11672406
56	R2.25#2	11672300	R2.25S#2	11672412
62	R2.50#3	11672317	R2.50S#3	11672429
69	R2.75#4	11672323	R2.75S#4	11672435
74	R3.00#5	11672346	R3.00S#5	11672441
81	R3.25#6	11672352	R3.25S#6	11672458
87	R3.50#7	11672369	R3.50S#7	11672464
95	R3.75#8	11672375	R3.75S#8	11672493
100	R4.00#9	11672381	R4.00S#9	11672501

Die Klassiker



Das Ring Pessar, welches mit oder ohne verstärkende Membran erhältlich ist, wird vornehmlich bei einem milden Uterusprolaps ersten Grades oder bei einer Zystozele verwendet.

Alternativ kann auch das Ovale Pessar (Seite 8) bei gleichen Indikationen eingesetzt werden.

Urethra Pessar







ohne Verstärkung mit Verstärkung

mm	ArtNr.	PZN	ArtNr.	PZN
43	RK1.75#0	11673311	RK1.75S#0	11673417
49	RK2.00#1	11673328	RK2.00S#1	11673423
56	RK2.25#2	11673334	RK2.25S#2	11673452
62	RK2.50#3	11673340	RK2.50S#3	11673469
69	RK2.75#4	11673357	RK2.75S#4	11673475
74	RK3.00#5	11673363	RK3.00S#5	11673481
81	RK3.25#6	11673386	RK3.25S#6	11673498
87	RK3.50#7	11673400	RK3.50S#7	11673506

Das Ring Pessar mit Knopf, auch Urethra Pessar genannt, ist mit oder ohne Verstärkung erhältlich.

Es kann über die Indikationen des Ring Pessars hinaus auch bei einem ausgeprägten Uterusprolaps eingesetzt werden und eine bestehende Belastungsinkontinenz lindern.



Uterusprolaps 1.-2. Grad



Uterusprolaps 2.-3. Grad



Zystozele



Rektozele



Belastungsinkontinenz



Anwendung i.d.R. durch Ärztin



Anwendung i.d.R. durch Patientin



Für weitere Informationen siehe: www.profem.eu.

ohne Verstärkung

mm Art.-Nr. PZN

DSH50#0

DSH55#1

DSH60#2

DSH65#3

DSH70#4

DSH75#5

DSH80#6

Die Klassiker

mit Verstärkung

Art.-Nr. PZN

DSH55S#1 11672719

DSH60S#2 11672725

DSH65S#3 11672731

DSH75S#5 11672754

DSH80S#6 11672783

DSH85S#7 11672808

11672636 DSH50S#0 11672820

11672671 DSH70S#4 11672748

Dish/Urethraschalen Pessar



11672642

11672659

11672665

11672688

11672694







Das Urethraschalen Pessar, welches mit oder ohne verstärkende Membran erhältlich ist. wird verwendet. um einen Uterusprolaps 1., 2. oder 3. Grades oder eine Zustozele zu entlasten. Dieses Pessar kann auch bei einer bestehenden Belastungsinkontinenz eingesetzt werden.

Shaatz/Siebschalen Pessar



18
30
47
53
76
82
99
07
13

Die Klassiker



Das Shaatz Pessar kann die Symptome einer Zystozele wie auch eines Uterusprolaps 2. bis 3. Grades lindern. Die konvexe Form sorgt für einen angenehmen Sitz, während die Perforation ein einfaches Entnehmen ermöglicht.

Cup/Schalen Pessar







ohne Verstärkung

mit Verstärkuna

mm	ArtNr.	PZN	ArtNr.	PZN
50	CP50/18#0	11673073	CP50/18S#0	11673185
55	CP55/23#1	11673096	CP55/23S#1	11673191
60	CP60/28#2	11673104	CP60/26S#2	11673216
65	CP65/33#3	11673110	CP65/33S#3	11673222
70	CP70/38#4	11673127	CP70/38S#4	11673239
75	CP75/43#5	11673133	CP75/43S#5	11673245
80	CP80/48#6	11673162	CP80/48S#6	11673251
85	CP85/52#7	11673179	CP85/52S#7	11673268

Das Schalen Pessar ist in zwei Versionen mit oder ohne Verstärkung erhältlich. Es findet bei einem Uterusprolaps ersten oder zweiten Grades Anwendung.

Dieses Pessar kann auch bei einer Zustozele oder einer bestehenden Belastungsinkontinenz eingesetzt werden.

Uterusprolaps 1.-2. Grad



Uterusprolaps 2.-3. Grad



Zystozele



Rektozele



Belastungsinkontinenz



Anwendung i.d.R. durch Ärztin



Anwendung i.d.R. durch Patientin



Für weitere Informationen siehe: www.profem.eu.



Die Alternativen

Donut Pessar





ArtNr.	PZN	
D2.00#0	11671217	S I
D2.25#1	11671223	(
D2.50#2	11671246	е
D2.75#3	11671252	
D3.00#4	11671269	V
D3.25#5	11671281	þ
D3.50#6	11671298	1

Das Donut Pessar kann eingesetzt werden. um einen Uterusprolaps 2. oder 3. Grades, eine Zystozele oder eine Rektozele zu behandeln. Dieses Pessar wird häufig von Frauen in der Postmenopause verwendet. Durch die runde Form und das weiche Material wird nur ein diskreter Druck ausgeübt. Es kann zum leichteren Einführen und Entfernen zusammengedrückt werden.

Ovales Pessar

ohna Varstärkung



onne verstarkung			mil verstarkung		
mm	ArtNr.	PZN	ArtNr.	PZN	
51	OV2.00#1	11672056	OV2.00S#1	11672263	
57	OV2.25#2	11672062	OV2.25S#2	11672151	
63	OV2.50#3	11672079	OV2.50S#3	11672168	
69	OV2.75#4	11672085	OV2.75S#4	11672174	
76	OV3.00#5	11672091	OV3.00S#5	11672205	
82	OV3.25#6	11672116	OV3.25S#6	11672211	
89	OV3.50#7	11672122	OV3.50S#7	11672228	
95	OV3.75#8	11672139	OV3.75S#8	11672240	
101	OV4.00#9	11672145	OV4.00S#9	11672257	



mit Verstärkung

Das ovale Pessar, erhältlich mit oder ohne Verstärkung, wird gewöhnlich bei einem milden Uterusprolaps ersten Grades oder bei einer Zystozele eingesetzt.

Durch die Form des Pessars wird ein Verdrehen vermieden. Dies kann z. B. bei Frauen mit vorhergehenden Operationen im Vaginalbereich hilfreich sein.

Marland Pessar



Die Alternativen





mm	ArtNr.	PZN	ArtNr.	PZN
58	M2.25#2	11671884	M2.25S#2	11671967
64	M2.50#3	11671890	M2.50S#3	11671973
70	M2.75#4	11671915	M2.75S#4	11671996
76	M3.00#5	11671921	M3.00S#5	11672004
83	M3.25#6	11671938	M3.25S#6	11672010
89	M3.50#7	11671944	M3.50S#7	11672027
95	M3.75#8	11671950	M3.75S#8	11672033

Das Marland Pessar ist mit oder ohne verstärkende Membran erhältlich. Es wird verwendet. um die Symptome eines Uterusprolaps 2. oder 3. Grades oder einer Zustozele zu behandeln.

Plattform kann es auch bei einer bestehenden Belastungsinkontinenz eingesetzt werden.

Durch die erhöhte

essare: Die Alternativer

Legende



Uterusprolaps
1.-2. Grad



Uterusprolaps 2.-3. Grad



Zystozele



Rektozele



Belastungsinkontinenz



Anwendung i.d.R. durch Ärztin



Anwendung i.d.R. durch Patientin



Für weitere Informationen siehe: www.profem.eu.



kurz

Die Alternativen

Gellhorn Pessar







			2	
m	ArtNr.	PZN	ArtNr.	PZN
	GS1.50#0	11671772	G1.50D#0	11671660
	GS1.75#1	11671789	G1.75D#1	11671677
	GS2.00#2	11671795	G2.00D#2	11671683
	GS2.25#3	11671803	G2.25D#3	11671708
	GS2.50#4	11671826	G2.50D#4	11671714
	GS2.75#5	11671832	G2.75D#5	11671720
	GS3.00#6	11671849	G3.00D#6	11671737
	GS3.25#7	11671861	G3.25D#7	11671743
	GS3.50#8	11671878	G3.50D#8	11671766

Das Gellhorn oder auch Keulen Pessar findet Verwendung, um die Symptome einer Zystozele, einer Rektozele oder auch eines Uterusprolaps 2. oder 3. Grades zu mildern. Das Pessar ist in zwei Ausführungen, mit unterschiedlichen Schaftlängen, erhältlich. und kann zum leichteren Einführen oder Entfernen zusammengefaltet werden.

Einige ProFem® Pessare sind in einer so genannten verstärkten Variante erhältlich.

Diese bieten durch die eingearbeitete Membran eine noch bessere Unterstützung und finden bei ausgeprägten Senkungsbeschwerden Anwendung.

Die Perforation dient dem besseren Abfluss von Sekreten und dem leichteren Entfernen des Pessars.

Die ProFem® Würfel Pessare können auch ohne Perforation bestellt werden, wenn eine stärkere Haftung an der Scheidenwand wünschenswert ist.



Für weitere Informationen siehe: www.profem.eu.

Pessare & ihre Besonderheiten



T

Uterusprolaps
1.-2. Grad



Uterusprolaps 2.-3. Grad



Zystozele



Rektozele



Belastungsinkontinenz



Anwendung i.d.R. durch Ärztin



Anwendung i.d.R. durch Patientin



Für weitere Informationen siehe: www.profem.eu.



Die Spezialisten

Gehrung Pessar





n	ArtNr.	PZN
	GH50S#0	11671306
	GH55S#1	11671335
	GH60S#2	11671341
	GH65S#3	11671358
	GH70S#4	11671364
	GH75S#5	11671370
	GH80S#6	11671387
	GH85S#7	11671393
	GH90S#8	11671401

Das verformbare Gehrung
Pessar mit verstärkender
Membran wird vornehmlich
bei einer ausgeprägten
Zystozele oder Rektozele
eingesetzt. Es lindert
auch die Symptome eines
Uterusprolaps 2. oder 3.
Grades. Dieses Pessar enthält
einen Metallkern und kann
manuell geformt werden, um
individuellen Problemen oder
anatomischen Gegebenheiten
Rechnung zu tragen.

Hodge Pessar



ohne Verstärkung	mit Verstärkung


mm	ArtNr.	PZN	ArtNr.	PZN
65	HD65#0	11671418	HD65S#0	11671536
70	HD70#1	11671424	HD70S#1	11671542
75	HD75#2	11671430	HD75S#2	11671559
80	HD80#3	11671447	HD80S#3	11671571
85	HD85#4	11671453	HD85S#4	11671588
90	HD90#5	11671476	HD90S#5	11671594
95	HD95#6	11671482	HD95S#6	11671625
100	HD100#7	11671499	HD100S#7	11671631
105	HD105#8	11671507	HD105S#8	11671648
110	HD110#9	11671513	HD110S#9	11671654

₽ Di€

zu formen.

Die Spezialisten



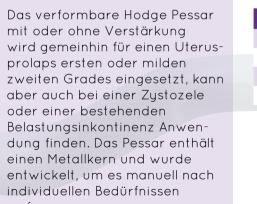

Aufblasbares Donut Pessar





mm	ArtNr.	PZN
51	ID2.00#2	11673274
58	ID2.25#3	11673280
64	ID2.50#4	11673297
70	ID2.75#5	11673305

Das Aufblasbare Donut
Pessar wurde entwickelt, um
ein komfortables Einsetzen
und Herausnehmen zu
ermöglichen. Zu diesem
Zweck kann es mit Hilfe der
beigefügten Handpumpe
aufgepumpt oder vollständig
entleert werden. Es wird
eingesetzt, um die Symptome
einer Zystozele oder einer
Rektozele in Kombination
mit einem Prolaps 2. oder 3.
Grades abzuschwächen.



Uterusprolaps 1.-2. Grad



Uterusprolaps 2.-3. Grad



Zystozele



Rektozele



Belastungsinkontinenz



Anwendung i.d.R. durch Ärztin



Anwendung i.d.R. durch Patientin



Für weitere Informationen siehe: www.profem.eu.

Indikationen

Uterusprolaps














Die Anatomie der Frau ist im Laufe des Lebens großen Belastungen ausgesetzt, z.B. den Anstrengungen von Schwangerschaft, Geburt und evtl. den Auswirkungen von gynäkologischen Eingriffen. Diese Belastungen können die körpereigenen Stützstrukturen des Beckens schwächen und somit zum örtlichen Nachgeben des Beckenbodens führen. Man unterscheidet verschiedene Grade von Senkungsbeschwerden. Der Uterusprolaps oder Gebärmuttervorfall ist die extreme Form einer Gebärmuttersenkung, wobei die Gebärmutter teilweise oder ganz durch die Scheide nach außen tritt.

Zustozele



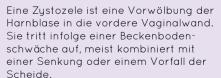

Rektozele



Eine Rektozele ist eine Aussackuna der Mastdarmvorderwand in die Scheide aufgrund einer Schwäche der Wandschichten zwischen Enddarm und Scheide.

Belastungsinkontinenz



Belastungsinkontinenz bezeichnet den unwillkürlichen Urinabgang bei einer Druckerhöhung im Bauchraum. Aufgrund einer eingeschränkten Funktionsfähigkeit des Verschlussapparats kann es dann zum Urinverlust kommen.

Kontakt

Sayco PTY Ltd.

Zweigstelle Deutschland Posener Straße 48 74321 Bietigheim-Bissingen Tel. +49 7142 913 22 33 Fax +49 7142 779 24 28

info@sayco-europe.com www.profem.eu



ProFem® ist eine eingetragene Marke der SAYCO PTY Ltd.

